



Guía de adquisición de mamografías para el uso de quantusMM



TRANSMURAL BIOTECH S.L. C/BEETHOVEN 15 PLANTA 4 DESP 18. 08021. BARCELONA ESPAÑA




FECHA: 26.09.2022

NÚMERO DE EDICIÓN: 1.0

REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN Y SUBIDA DE ARCHIVOS DE IMAGENES

- Los archivos de imágenes deben ser formato DICOM. (dcm)
- La web requiere la subida de dos imágenes por mama correspondientes a la perspectiva Cráneo-Caudal (CC) y a la perspectiva Lateral Medio Oblicua (MLO).
- La web permite el análisis una o dos mamas conjuntamente (2 imágenes o 4 imágenes).
- Todos los archivos de imágenes tienen que **renombrarse** de la siguiente manera:
 - Deben tener el mismo prefijo para poder realizar el análisis agrupado.
 - Añadir el sufijo _1, _2, _3 o _4 para identificar la lateralidad y la perspectiva.
- Ejemplo:
 - ejemplo_1.dcm *Para la mama DCHA Cráneo-caudal (CC)*
 - ejemplo_2.dcm *Para la mama IZDA Cráneo-caudal (CC)*
 - ejemplo_3.dcm *Para la mama DCHA Lateral Medio Oblicua (MLO)*
 - ejemplo_4.dcm *Para la mama IZDA Lateral Medio Oblicua (MLO)*

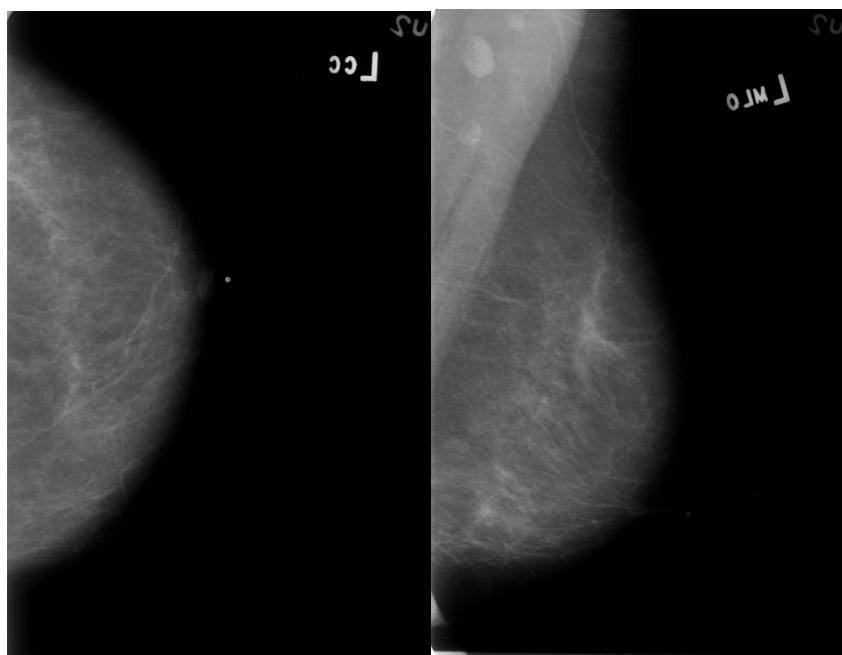

Vista CC

Vista MLO

Imágenes tomadas del dataset público DDSM. (<https://wiki.cancerimagingarchive.net/display/Public/CBIS-DDSM>)

CONTACTO

Para más información contáctenos en:

support@quantusMM.org

o visite:

www.quantusMM.org