



Guía de Adquisición



TRANSMURAL BIOTECH S.L. C/BEETHOVEN 15 PLANTA 4 DESP 18. 08021. BARCELONA ESPAÑA



FECHA: 05/07/2024

NÚMERO DE EDICIÓN: 1

Guía de adquisición para Osteoporosis




- **Radiografía (rayos X) anteroposterior (AP) de la cadera en formato DICOM.**
- Posibilidad de ser de ambos costados (toda la pelvis entera) o únicamente del derecho o izquierdo (media pelvis).
- Se aceptan imágenes con prótesis en uno de los dos costados, aunque no se dará resultado de ese costado.



No se aceptan vistas axiales o otras que no sean anteroposterior.



Se debe visualizar la cabeza completa de el/los fémur/es.

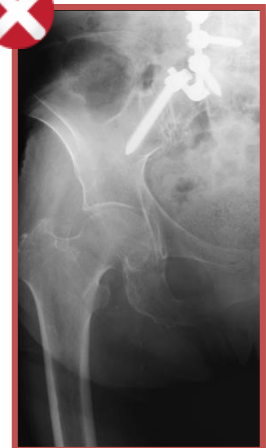

Se deben evitar clavos u otros elementos cerca del fémur a analizar.

Protocolo clínico de adquisición de la toma:

Citation: Murphy A, Knipe H, Er A, et al. Pelvis (AP view). Reference article, Radiopaedia.org (Accessed on 25 Apr 2024) <https://doi.org/10.53347/rID-44863>

DOI: <https://doi.org/10.53347/rID-44863>

rID: 44863

Permalink: <https://radiopaedia.org/articles/44863>