



*Guía de adquisición de imágenes para el uso de
quantusRT-OCT*



TRANSMURAL BIOTECH S.L. C/BEETHOVEN 15 PLANTA 4 DESP 18. 08021. BARCELONA ESPAÑA




FECHA: 05.07.2024

NÚMERO DE EDICIÓN: 1.0

■ *Imágenes quísticas detectadas (1/3)*





Lesiones bien definidas intraretinianas de volumen superior a ejemplos

Densidad de la lesión similar a la de la cavidad vítrea

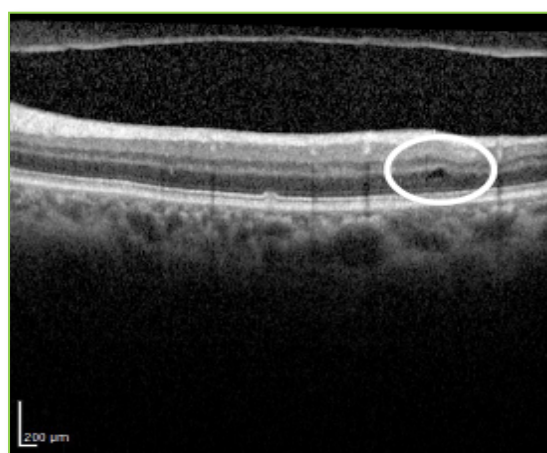

■ Imágenes quísticas detectadas (2/3)



Lesiones que modifiquen el perfil de la retina

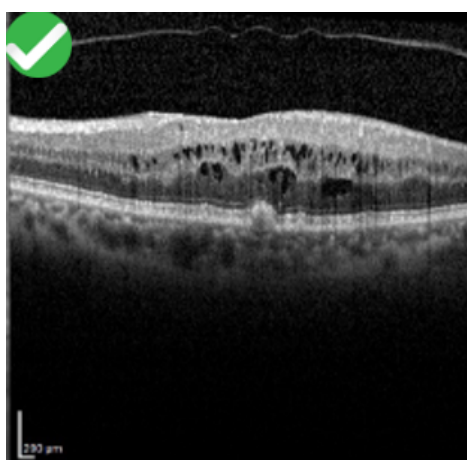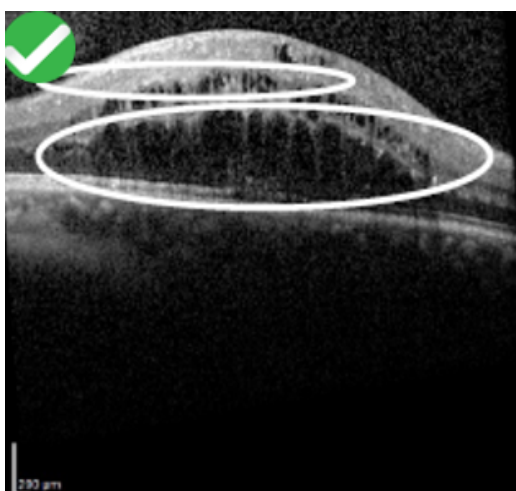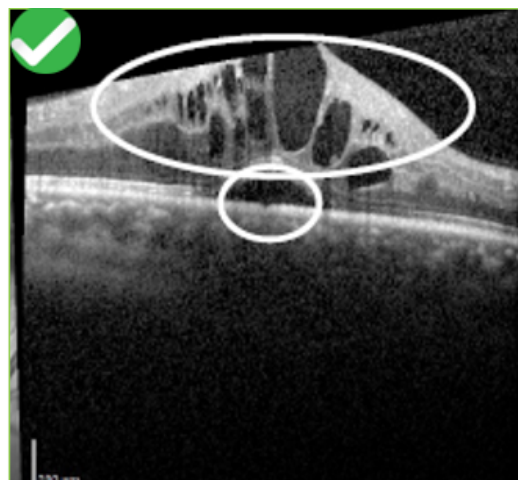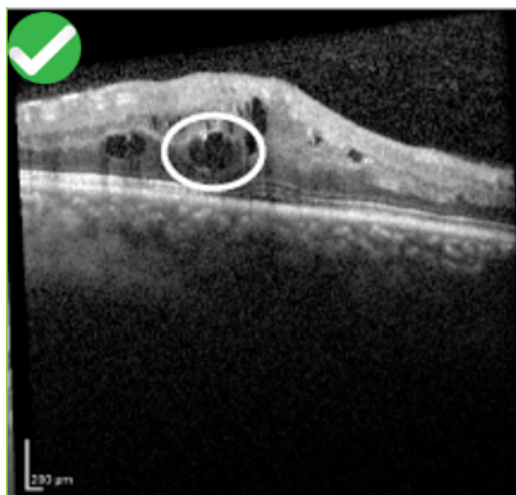

■ Imágenes quísticas detectadas (3/3)

En lesiones bien definidas, contiguas, se puede considerar el conjunto de ellas como única lesión dentro de la misma capa, por ejemplo, en la granulosa interna y externa

Presencia de fluido subretiniano



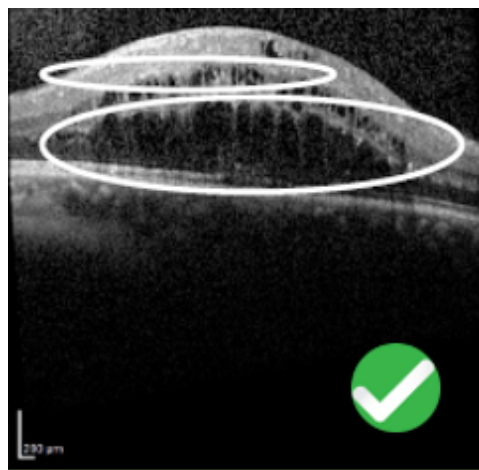
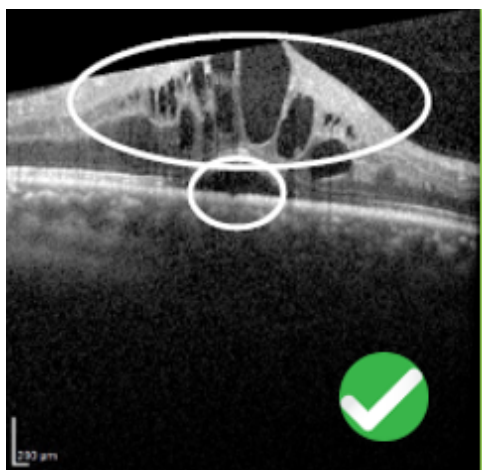


No se considerarán como tales las lesiones “oscuras” de la granulosa externa o granulosa interna que no estén bien identificadas, aunque eleven
No se consideran las zonas de sombra de vasos




■ *Puntos hiperreflectantes detectados (1/2)*

Lesiones de brillo y tamaño mayores o iguales a ejemplo

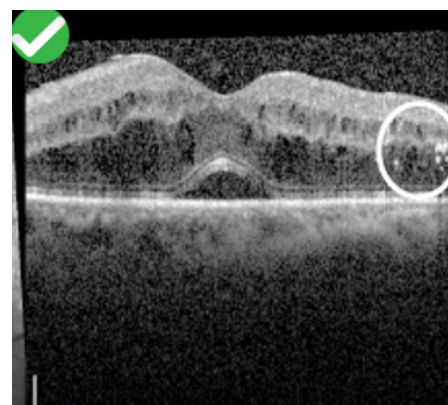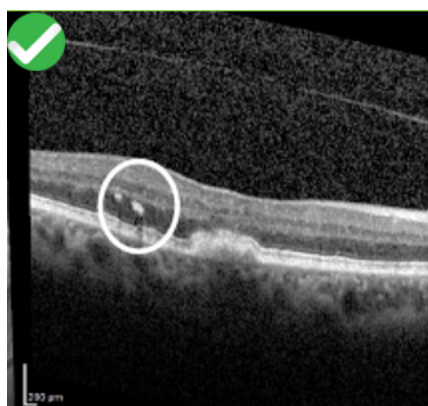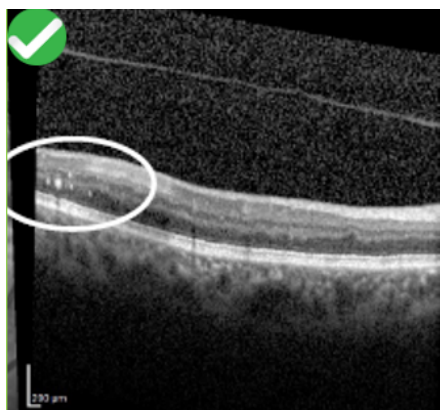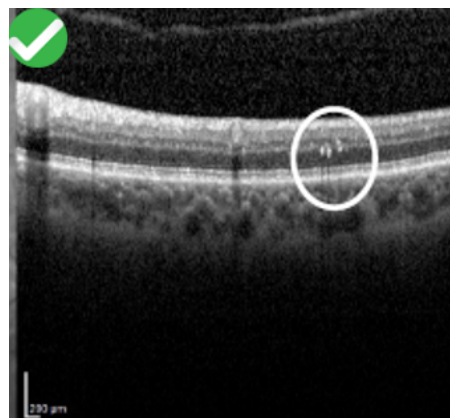

■ Puntos hiperreflectantes detectados (2/2)

No son válidas las lesiones de menor brillo o tamaño compatibles con vasos o dudosas

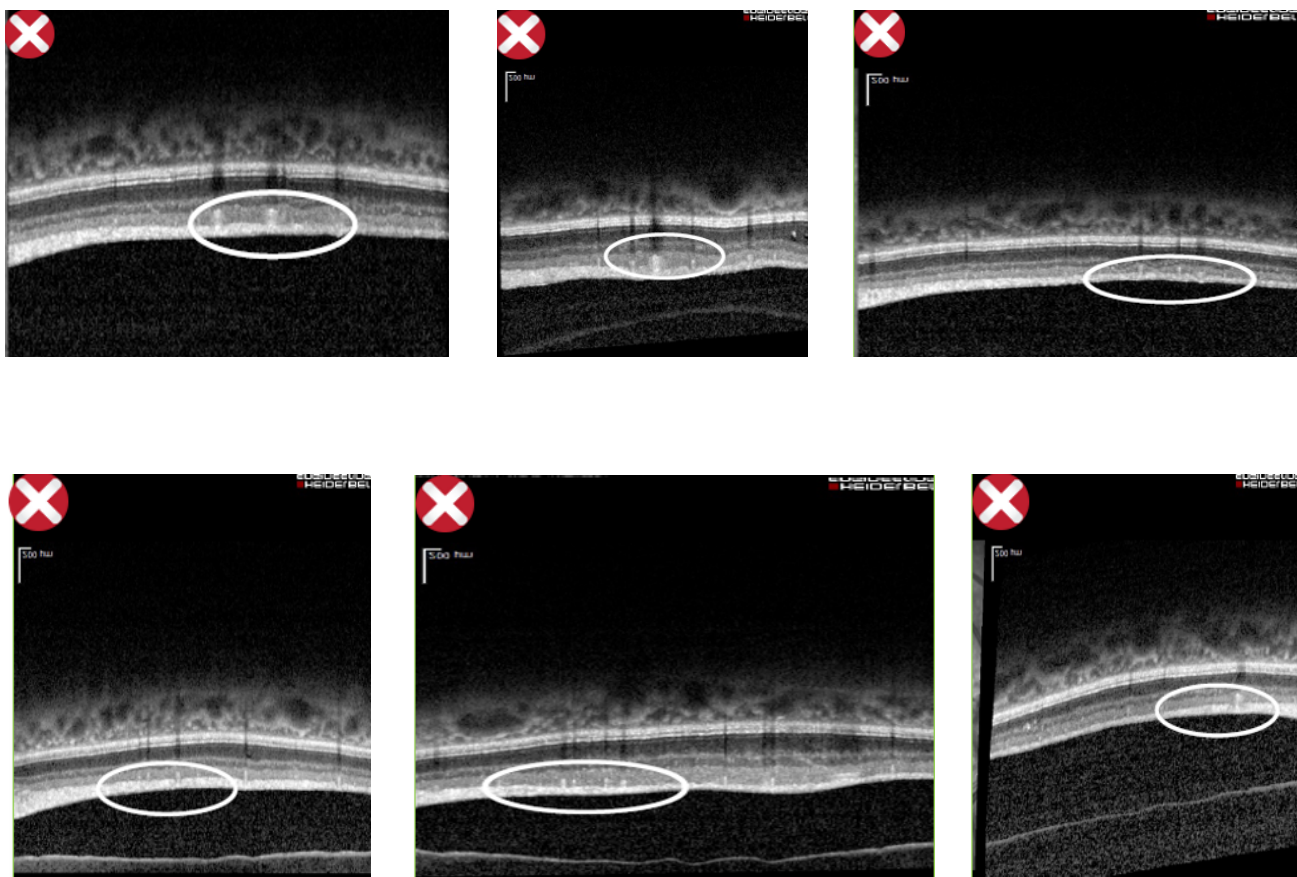

CONTACTO

Para más información contáctenos en:

support@quantusRT-OCT.org

o visite :

www.quantusRT-OCT.org