



Guía Adquisición



Transmural Biotech S.L. ; Calle Juan Ignacio Luca de Tena 12, 28027 Madrid España



FECHA: 10/06/2023


NÚMERO DE EDICIÓN: 1




- Imagen obtenida con retinógrafo.
- Se recomienda no utilizar una resolución de imagen menor a 2 Mpx.
- El sistema acepta todo tamaño de imágenes, pero las reescalará a 1200x1200px. Por lo tanto se recomienda ajustarse a este tamaño lo máximo posible.
- Las imágenes deben estar en formato de imagen JPEG o PNG.
- Se debe ver la esfera de la retina completa ocupando toda la imagen.
- Evitar bordes o marcos alrededor de la retina.
- La imagen no debe estar tratada con ningún filtro ni procesado de ningún tipo.
- No debe aparecer ninguna medida o marcador encima de la lesión.



Se debe ver la retina completa.

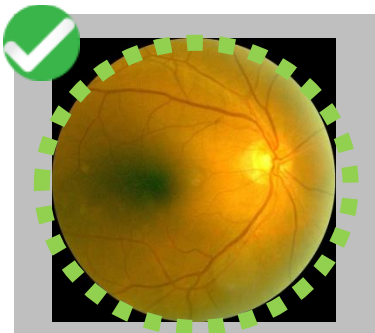

Evitar bordes o marcos.

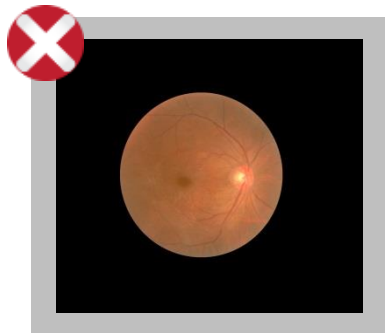

No debe aparecer ningún marcador de medida.

